

機械器具 48 注射筒
一般医療機器 汎用注射筒 13929001
オムニフィックス・インジェクト
(インジェクト シリンジ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- 再使用禁止
- 造影剤等の高圧注入を行うと破損等のおそれがあるので、使用しないこと。

** 【形状・構造及び原理等】


<構造図（代表例）>

(全体形状図)

本品は外筒、プランジャからなる。

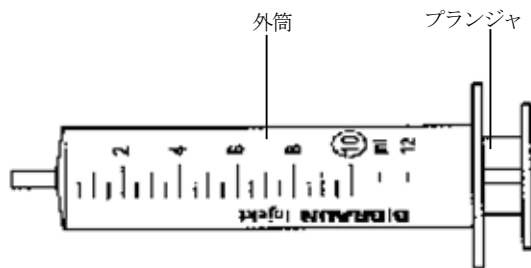

(先端の形状図)

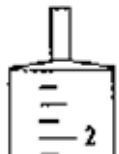

ルアースリップタイプ



ルアーロックタイプ

** <材質>

- 外筒：ポリプロピレン
- プランジャ：高密度ポリエチレン

【使用目的又は効果】

本品は薬液の注射、採血、薬液の分注等に用いるプラスチック製の器具である。

【使用方法等】

包装を開封し、シリンジを包装内から無菌的に取り出す。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

** 【使用上の注意】

* <不具合・有害事象>

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

1) 重大な不具合

- 不適切な取り扱い、管理により破損、変形等が生じる可能性がある。

2) 重大な有害事象

以下のような有害事象が発現した場合は、直ちに適切な処置を行うこと。

- 不適切な取り扱い、使用方法により血管などの損傷
- 感染症（誤刺など）

以上の有害事象の治療のため、再手術が必要な場合もある。

** 3) その他の不具合

- 液漏れ
- 摺動抵抗の増加
- 目盛り等の印字部のかすれ、剥がれ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

2. 使用期限

- 使用期限は外箱に記載。（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

問い合わせ窓口：マーケティング部 TEL (03) 3814-2704

製造元：アルモ エアツォイクニセ エルヴィーン ブッシュ（ドイツ）

Almo Erzeugnisse Erwin Busch GmbH

製造元：ビー・ブラウン メディカル アーゲープラント エシヨールツ
マット（スイス）

B.Braun Medical AG Plant Escholzmatt