

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 短期的使用口腔咽頭エアウェイ 70259000

## ニプロバイトブロック (未滅菌)

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】


##### 1. 使用方法

- 1) 再使用禁止
- 2) 本品に対して乾熱滅菌及び高圧蒸気滅菌は行わないこと。  
[本品が変形、もしくは破損する。]

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状・構造

本品の形状は以下に示す通りである。  
また、本品は未滅菌である。

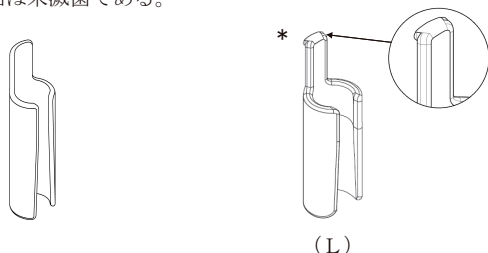

#### <寸法>

全長: 56mm	* (L)	全長: 60mm
外径: 15.5mm		外径: 18.0mm
内径: 10.6mm (上部)		内径: 12.6mm (上部)
12.1mm (下部)		14.1mm (下部)

※ 固定用テープが付属する場合があります。

##### 2. 材質

本品	ポリプロピレン
----	---------

#### 【使用目的又は効果】

本品は、気管内チューブの開存性の維持及び保護を目的に気管内チューブに取り付けて使用する機器であり、口腔のみに挿入する。

#### 【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品を気管内チューブにはめ込み、気管内チューブを挿管します。
- \*3. 本品を適切な位置に設置し、気管内チューブのインフレーションライン及びカフ上吸引ラインが閉塞していないことを確認します。
4. 固定用テープで本品と気管内チューブを患者に固定します。
5. 使用後は感染防止に留意し安全な方法で廃棄します。

#### <使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 使用前に、気管内チューブと本品の形状、サイズが適合していることを必ず確認してください。
2. 本品を気管内チューブ等にはめ込む際、無理な力をかけないようにしてください。[気管内チューブ等が破損するおそれがあります。]
- \*3. 固定用テープで本品を固定する際に、インフレーションライン及びカフ上吸引ラインを歯で噛まないように逃がして固定してください。
4. 閉塞する場合、本品を使用しないでください。
5. 固定用テープが付属しない場合は、別途テープを準備し本品を固定してください。
6. 上記は一般的な方法です。必要に応じて医師各位の臨床経験に基づき、手順の追加、変更を行ってください。
7. 本品を長期間に渡って口腔内に留置する場合、適宜取り替えてください。

8. 本品を取り替える場合は、【使用方法等】の1.～4.の手順に従って行ってください。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- 1) 定期的本品等の挿入状態を確認すること。[本品が抜けるおそれがある。また、固定した気管内チューブに対して、横方向に力がかかることで、気管内チューブが抜けるおそれがある。]

\*\*2) 使用中に本品の破損等の異常が認められた場合には使用を中止し、新しい製品と交換すること。

##### \*2. 不具合・有害事象

###### 1) その他の不具合

- (1) 本品及び気管内チューブの破損
- (2) 固定したチューブ等からの外れ

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*\*製造販売 (お問い合わせ先)

ニプロ株式会社

フリーダイヤル: 0120-226-410

受付時間: 9:00~17:15 (土・日・祝日を除く)

製造

ニプロ株式会社



ニプロ株式会社