

## 採液アダプタ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

#### 1. 使用方法

- 1) 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

#### \*1. 形状・構造

〔構造図（代表図）〕



コネクタはIS080369-3（経腸栄養用コネクタ規格）に適合する。

#### \*2. 材質

コネクタ	ポロプロピレン、ポリ塩化ビニル
チューブ	ポリ塩化ビニル

ポリ塩化ビニルの可塑剤は、トリメリット酸トリ-2-エチルヘキシルである。

### 【使用目的又は効果】

栄養剤容器等から栄養剤等を採取するために用いる。

### 【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. シリンジに接続し、栄養剤等を吸引します。

### <使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品は、IS080369-3（経腸栄養用コネクタ規格）対応のため、IS080369-3に適合する製品と接続してください。IS080369-3であるかどうかは包装表示で確認してください。
2. 接続部への経腸栄養剤や医薬品等の付着に注意してください。〔接続部の緩み等のおそれがあります。〕

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 1) コネクタを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。〔コネクタが外れなくなる、又はコネクタが破損し、接続部からの液漏れ、空気混入のおそれがある。〕
- 2) 使用中は本品の破損、接合部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
- 3) ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 4) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

#### 2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年〔自己認証（自社データ）による〕

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO (SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]



ニプロ株式会社