

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 採血用穿刺器具 70226000

ニプロセーフティーライトショット

【警告】

- 感染のおそれがあるため、採血前に穿刺部位の消毒を必ず行うこと。
- 使用後の穿刺針は他の人に触れないように廃棄すること。
- 穿刺針を穿刺器具本体に装着したまま、放置しないこと。
[針が誤って発射されるおそれがある。]


【禁忌・禁止】

- 穿刺針は再使用禁止。毎回新しいものを使用すること。[付着した血液等を介した感染症の原因となる可能性がある。]
- 本品にはニプロセーフティーランセット以外のランセットは使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、ニプロセーフティーランセット(穿刺針)を取り付けて使用する穿刺器具本体とカバーキャップで構成される。

原理：穿刺器具本体内部のスプリングの張力により穿刺針をニプロセーフティーランセットのホルダー先端より突出させ、穿刺する。

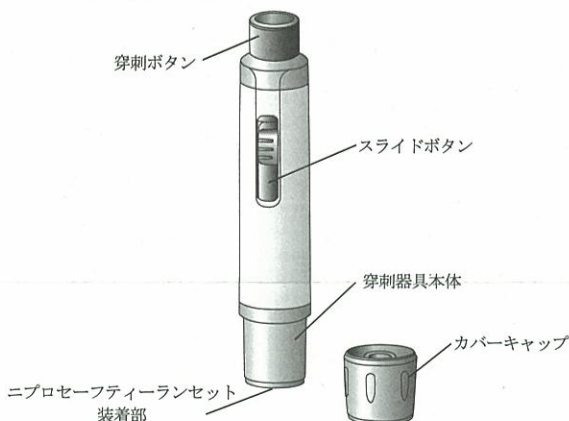

【使用目的、効能又は効果】

血糖自己測定などの微量採血を目的とするブラッドランセットを装着するために用いる穿刺器具をいう。

【操作方法又は使用方法等】

1. ニプロセーフティーランセットのホルダー部分をしっかりと固定し、プロテクションキャップ(ネジ切りキャップ)をゆっくりと180度回転させキャップを外します。
2. 穿刺器具本体に取り付けられているカバーキャップをとり、ニプロセーフティーランセット装着部にニプロセーフティーランセットを装着します。
[注意] 装着は確実に奥まで差し込んでください。
3. 穿刺部位をアルコール綿、お湯、石鹸水などで洗い清潔にし、乾燥させます。
4. 穿刺器具本体に装着したニプロセーフティーランセットのホルダーの先端を穿刺部位(指先、手のひら等)に押し当て、穿刺ボタンを押します。
[注意] 採血の際は穿刺部位や穿刺器具本体を動かさないようにしてください。
5. 穿刺後、適切な量が得られるまで、穿刺部を軽く押し当てたまま待ちます。
[注意] 指先への穿刺の場合、穿刺後、穿刺部位の手前を指で軽く押してください。
6. 穿刺で得られた血液は、直ちに血糖測定等に用います。
7. 前腕への穿刺の場合は、穿刺前に穿刺部をよくこすってください。マッサージすることで採血部位による測定値の相違を少なくしてください。

8. 穿刺器具本体の横側にあるスライドボタンをゆっくり下にスライドさせ、使用後のニプロセーフティーランセットを取り外します。
[注意] 感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。
9. 使用後の穿刺器具本体は、カバーキャップを取り付けて保管してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- **○指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗うこと。
- **○果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがある。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告がある。]
- **○以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがある。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害
- 取り付けるニプロセーフティーランセットの添付文書を参照すること。
- 使用前にニプロセーフティーランセットのホルダーから針先が出た状態の場合は、その製品を使用しないこと。
- 前腕などからの採血で血糖測定を行うことは可能であるが低血糖の兆候や症状があらわれた場合は指先からの採血をすること。
- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 使用後にニプロセーフティーランセットのホルダーの先端から針先が出ていないことを確認すること。
- 穿刺器具本体からニプロセーフティーランセットを無理矢理取り外さないこと。使用後スライドボタンをゆっくり下にスライドすれば簡単に取り外すことができる。
- 使用後の穿刺器具本体は、カバーキャップを取り付けて保管すること。
- **○耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないこと。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがある。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討すること。]
- **○分解・修理・改造はしないこと。

**<不具合・有害事象>

処置後出血

<その他の注意>

本品の手入れは、堅くしぼった布などで拭くこと。シンナー、消毒液などで拭いた場合、又は高温殺菌(オートクレーブや煮沸など)した場合は変形したりすることがあるので、絶対に行わないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

<貯蔵・保管方法>

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【包装】

1個/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売(お問い合わせ先)

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号：06-6372-2331(代表)

フリーダイヤル：0120-834-226 (電話番号をよくお確かめの
上、おかけ頂きますようお願い致します。)
9:00~17:30(土、日、祝祭日をのぞく)

製造(輸入先)

ユーメド バイオテクノロジー コーポレーション リミテッド

[EUMED Biotechnology Co., Ltd.]

台湾

[Taiwan]

取扱説明書を必ずご参照ください。



ニプロ株式会社