

変換コネクタEN

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 使用方法

- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

〔構造図（代表図）〕

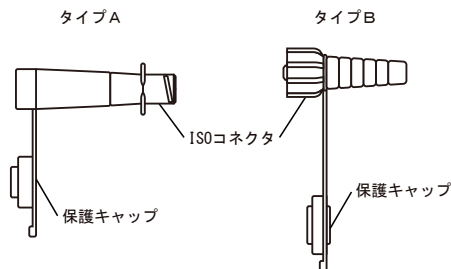

ISOコネクタはISO080369-3（経腸栄養用コネクタ規格）に適合する。

2. 材質

タイプA	ポリ塩化ビニル
タイプB	ポリプロピレン

ポリ塩化ビニルの可塑剤は、トリメリット酸トリ-2-エチルヘキシルを使用している。

【使用目的又は効果】

胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して経腸栄養剤を投与するために用いる。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 他の医療機器と速やかに接続します。
3. 必要に応じて保護キャップを閉じます。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品は、既存規格製品とISO080369-3（経腸栄養用コネクタ規格）適合製品を接続するための変換コネクタであるため、接続する製品のコネクタ規格を確認して使用してください。
2. 接続部への経腸栄養剤や医薬品等の付着に注意してください。〔接続部の緩み等のおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) コネクタを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。〔コネクタが外れなくなる、又はコネクタが破損し、接続部からの液漏れ、空気混入のおそれがある。〕
- *2) ISO080369-3（経腸栄養用コネクタ規格）適合製品のコネクタを接続する場合は注意すること。〔外れなくなるおそれがある。〕
- 3) 使用中は本品の破損、接合部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。

- 4) 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤等を含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、コネクタのひび割れについて注意すること。〔薬液によりコネクタにひび割れが生じ、薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。〕
- 5) ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 6) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO(SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]