

ニプロヘパリン注入ライン

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法

1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

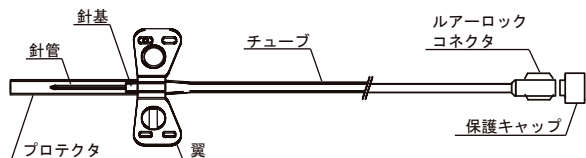

2. 材質

針管	ステンレス鋼
針基、チューブ	ポリ塩化ビニル
ルアーロックコネクタ	ポリカーボネート

ポリ塩化ビニルの可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルである。

【使用目的又は効果】

滅菌済みであるから、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

1. 手袋を装着する等汚染に十分注意し、包装から本品を取り出します。
2. 薬液を充填した注射筒をルアーロックコネクタに取り付け、針管の先端を上にして本品内部に薬液を満たします。
3. プロテクタを真っ直ぐ取り外し、血液回路の針刺し混注部に針管を刺通して側注します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. プロテクタを外すとき、針先がプロテクタに触れないよう注意してください。[針先変形のおそれがあります。針先が変形した場合は、本品を新しいものと交換してください。]
2. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
3. ルアーロックコネクタの接続部に薬液を付着させないでください。[接続部の緩み等のおそれがあります。]
4. 針管をゴムボタンに刺通する場合は、なるべく刺通面に垂直に刺し、横方向に力をかけたり、同一部位に刺通されることがないように注意してください。
5. プライミング時に接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は、使用しないでください。
6. リキャップしないでください。[リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがあります。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) インジェクタ等を用いた造影剤等の高圧注入には使用しないこと。[液漏れ、又は破損のおそれがある。]
- 2) 脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので注意すること。
- 3) ヘパリンナトリウム等の血液凝固阻止剤を希釈、若しくは溶解して持続投与を行う場合には、ルアーロックタイプの注射筒や点滴ラインを使用すること。[注射筒等の接続が外れ、血液漏れや空気混入のおそれがある。]

- 4) 使用中は本品の破損、接合部の緩み、液漏れ、空気混入及び詰まり等について、定期的に確認すること。
- 5) 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤等を含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、ひび割れに注意すること。[薬液によりひび割れが生じ、薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等はひび割れの発生を助長する要因となる。]
- 6) ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 7) チューブを鉗子等で挟んで傷をつけないように、さらに、注射針の先端やはさみ等の鋭利なもので傷をつけないように注意すること。[液漏れ、空気混入、破損のおそれがある。]
- 8) チューブ等が身体の下等に挟まれないよう注意すること。[チューブ等の折れ、閉塞、破損等のおそれがある。]
- 9) チューブとルアーロックコネクタとの接合部には過度に引っ張る、押し込む、折り曲げるような負荷をかけないよう注意すること。[チューブの抜け、破損、伸び等のおそれがある。]
- 10) 針管に過度な負荷をかけないように注意すること。[針管の曲がりや破断、針基の破損のおそれがある。]
- 11) ルアーロックコネクタを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。[ルアーロックコネクタが外れなくなる、又はルアーロックコネクタが破損し、接続部からの液漏れ、空気混入のおそれがある。]
- 12) 翼の固定を十分に行うこと。[静脈への留置の際、あるいは本品を抜去する際に針管がズレたり、血管壁を損傷させるおそれがある。]
- 13) プライミング後は直ちに薬液を投与すること。[薬液汚染のおそれがある。]
- 14) ゴムボタン等に刺通する場合は、刺通部で固定すること。[過度に負荷がかかり、針管の曲がりや破断、針基の破損のおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO (SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]

