

フリーチューブ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 - 1) 再使用禁止
 - 2) 本品に移した血液を人体に戻さないこと。〔採取した血液の安全性は確保できていない。〕
 - 3) 本品は針付き注射筒を用いた採血以外での採血には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
本品はポリエチレンテレフタレート製試験管（PET管）及びキャップからなる。管内に種々の薬剤や部材を含む場合がある。
〔代表形状図〕

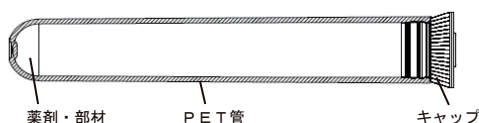

【使用目的又は効果】

開放型採血用チューブの定義から逸脱しない使用目的、効能又は効果

【使用方法等】

1. 室内温度になった本品を準備します。
2. 穿刺部位の消毒等を行います。
3. 針付き注射筒を用い、必要量の血液を採取します。
4. 本品のキャップを取り外します。針付き注射筒の注射針を取り外し、管壁に沿わせながらゆっくりと血液を試験管へ移します。
5. キャップをして、5回以上転倒混和します。
6. 混和後は静置します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 針付き注射筒の注射針を取り外す際には、誤って手指等に針を刺さないよう注意してください。
2. 転倒混和が不十分な場合、凝固促進剤入りの試験管では凝固不良が、抗凝固剤入りの試験管では血液凝固が発生するおそれがあります。
3. 転倒混和する際には、激しく振らないでください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 血清分離剤入りの試験管は、分離剤による隔壁形成後、極度の振動を与えることや、長時間の横倒しによる放置を避けること。
- 2) 血清分離剤入りの試験管は、隔壁形成後に再度遠心分離を行わないこと。〔検査値に影響を及ぼすおそれがある。〕
- 3) 抗凝固剤 EDTA-2K を含む顆粒薬剤は、顆粒の一部が褐色に変色している場合があるが、品質に影響はない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：1年又は2年

有効期間は管内の薬剤や部材により異なる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO (SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]