

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
管理医療機器 間欠泌尿器用カテーテル 36125000  
(直腸用カテーテル 10746000)

## ニプロネラトンカテーテルS


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 使用方法
  - 1) 再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造  
(代表図)

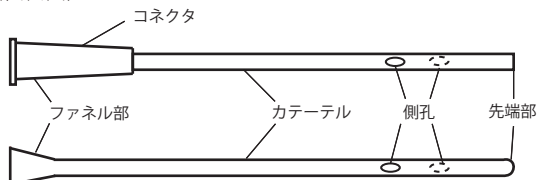

#### 2. 材質

コネクタ	ポリ塩化ビニル
カテーテル	ポリ塩化ビニル

可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルである。

#### 【使用目的又は効果】

経尿道的に膀胱に挿入し、導尿又は膀胱洗浄に用いる。また、経肛門的に下部消化管に挿入し、減圧若しくは腸管内容物の体外への排出、灌注のために用いる。

#### 【使用方法等】

##### 1. 泌尿器用として用いる場合

- 1) 包装を開封し、汚染に十分に注意して、本品を取り出します。
- 2) カテーテルの挿入部位に潤滑剤を塗布し、カテーテルを尿道口からゆっくり挿入します。
- 3) 必要に応じてファネル部に注射筒又はドレーンシステムのコネクタを確実に接続し、導尿又は膀胱洗浄等の処置を行います。
- 4) 必要な処置が完了したら、カテーテルをゆっくり抜去します。

##### 2. 直腸用として用いる場合

- 1) 包装を開封し、汚染に十分に注意して、本品を取り出します。
- 2) ファネル部に注射筒又はドレーンシステムのコネクタを確実に接続します。
- 3) カテーテルの挿入部位に潤滑剤を塗布し、カテーテルを肛門からゆっくり挿入します。
- 4) 減圧又は腸管内容物の体外への排出等の必要な処置を行います。
- 5) 必要な処置が完了したら、カテーテルをゆっくり抜去します。

#### <使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 接続部への体液や薬液等の付着に注意してください。[接続部の緩みのおそれがあります。]
2. カテーテル挿入時に抵抗がある場合は、無理に挿入せず、原因が解消したのちに行ってください。
3. 挿入する部位の粘膜損傷に注意してください。
4. カテーテルを挿入する際は、接続部側を十分に残して挿入してください。[カテーテルを抜去できなくなるおそれがあります。]
5. カテーテルを抜去する際は、ゆっくり引き抜いてください。[粘膜損傷のおそれがあります。]

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- 1) 脂溶性の医薬品では、ポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがある。
- 2) カテーテルを鉗子等で挟んだり、鋭利な器具等で製品を傷つけないよう注意すること。[漏れやカテーテル破断のおそれがある。]
- 3) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及びびつまりについて、十分注意すること。
- 4) 排尿が確認できない場合は、カテーテルが閉塞していないこと及びカテーテルが折れていないことを確認すること。
- 5) 体動等でねじれると尿路が閉塞するおそれがあるので注意すること。

##### 2. 不具合・有害事象

###### 1) その他の不具合

- (1) 破損
- (2) キンク
- (3) 閉塞

###### 2) その他の有害事象

- (1) 感染
- (2) 粘膜損傷

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

##### 2. 有効期間

包装に記載の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年 [自己認証 (自社データ) による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売 (お問い合わせ先)

ニプロ株式会社

フリーダイヤル: 0120-226-410

受付時間: 9:00~17:15 (土・日・祝日を除く)

製造

尼普洛 (上海) 有限公司

[NIPRO(SHANGHAI)CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]