

機械器具 74 医薬品注入器  
管理医療機器 単回使用注射用針 30889000  
(単回使用皮下注射用針 12745002)

## PICO針プラス™

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】


##### 1. 使用方法

- 1) 再使用禁止
- 2) セーフタッチキャップを被せた後に、セーフタッチキャップを無理に外したり壊したりしないこと。〔誤穿刺、血液飛散による感染のおそれがある。〕

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状・構造

本品は、皮下又は血管内に穿刺し、薬液の投与又は採血に用いる単回使用の滅菌済み注射針であり、針管、針基、プロテクタ及び使用後の針管に被せることで誤穿刺を防ぐセーフタッチキャップから構成されている。

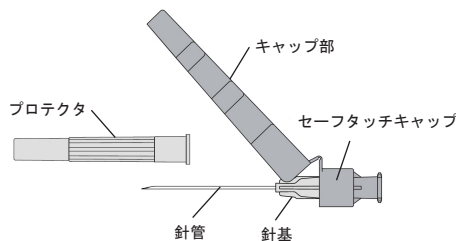

##### 2. 材質


針管	ステンレス鋼
針基、セーフタッチキャップ	ポリプロピレン

#### 【使用目的又は効果】

注射筒と接続して、皮下又は血管内に穿刺し、薬液の投与又は採血に用いる。

#### 【使用方法等】

1. 本品の包装をセーフタッチキャップと針基の接続部分から半分ほど開封し、包装ごとプロテクタを掴んでください。
2. 包装とプロテクタを掴んだ状態で、セーフタッチキャップに注射筒を接続してください。
3. 包装から本品を取り出し、セーフタッチキャップと針基の接続部分を持った状態で、プロテクタを真っ直ぐ引いて外してください。
4. 皮下又は血管内に穿刺し、薬液の投与又は採血を行ってください。
5. 使用後は、使用後の誤穿刺防止のために、下記の図のようにセーフタッチキャップのキャップ部を平らな面に押し込み、針管にカチッと音がするまで被せてください。

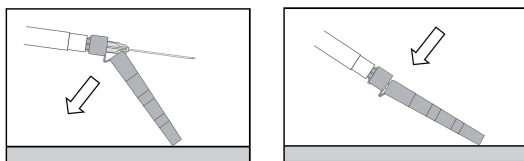

6. 感染防止に注意して、安全な方法で廃棄してください。

#### <使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品の接続部には直接手を触れないでください。〔汚染するおそれがあります。〕
2. 針管に過剰な力をかけたり、プロテクタを外す際に針管がプロテクタに触れないように注意してください。〔針先が変形し、穿刺しづらくなるおそれがあります。〕
3. 本品の針管には直接手を触れないでください。〔誤穿刺、感染のおそれがあります。〕

4. 接続部に薬液又は血液を付着させないように注意してください。〔接続部の緩み等が発生するおそれがあります。〕
5. 本品と注射筒を接続する際に、過度な力で締め付けを行わないでください。〔セーフタッチキャップ及び針基の破損のおそれがあります。〕
6. あらかじめ、針基とセーフタッチキャップの接続部の緩みがないことを確認してから使用してください。
7. セーフタッチキャップを針管に被せる際には、手で行わず、誤穿刺に注意し、使用方法5.に従って行ってください。
8. セーフタッチキャップの機構が正常に作動しなかった場合や作動時に破損した場合は、誤穿刺に注意し速やかに廃棄してください。
9. セーフタッチキャップを被せた後は、セーフタッチキャップには触れないようにしてください。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- 1) 本品を消毒する場合には、アルコール等は使用せず、ポビドンヨード等を使用すること。〔接続部が緩み、液漏れを誘発するおそれがある。〕
- 2) 本品はプラスチック製品のため、低温時の取扱いには注意すること。〔本品が破損するおそれがある。〕

##### 2. 不具合・有害事象

###### 1) その他の不具合

- (1) 針管のまくれ
- (2) プロテクタからの針管の飛び出し
- (3) 接続部の外れ
- (4) 薬液又は血液の漏れ
- (5) セーフタッチキャップの動作不良

###### 2) その他の有害事象

- (1) 血液を介した感染症
- (2) 金属アレルギー
- (3) 出血及び内出血
- (4) 誤穿刺

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

##### 2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後5年〔自己認証（自社データ）による〕

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### \*製造販売

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-069

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

##### 製造元（輸入先）

ニプロ・タイランド・コーポレーション

[Nipro (Thailand) Corporation Limited]

タイ王国[Thailand]

##### 販売元（お問い合わせ先）

ラジオメーター株式会社

東京都品川区北品川4-7-35

電話番号：03-6316-1588



**NIPRO**

ニプロ株式会社