

機械器具 74 医薬品注入器
管理医療機器 単回使用一般静脈用翼付針 70378000

輸注セット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品の構成部品は以下のとおりである。

<構成部品>

- 翼付針
- バイアルアダプター
- 絆創膏
- アルコール綿 (医薬品・外皮用殺菌消毒剤)
- 廃棄用ビニール袋

【使用目的又は効果】

本品は、用時溶解製剤を投与する際に必要な医療機器等を利用性のために組み合わせたキットである。

【使用方法等】

1. 本品を開封します。
2. 含まれる構成部品を適切な方法で展開します。
3. 展開した構成部品の種類、数量が内箱に表示されている本品の構成内容と相違ないか確認します。
4. 本品に含まれていない必要な製剤 (医薬品) を準備します。
5. 手を石鹸でよく洗ってから使用します。各構成部品は、それぞれの使用方法、効能・効果の範囲にて使用します。
6. 使用後は感染防止に留意して廃棄用ビニール袋に入れます。

<使用方法等に関する使用上の注意>

- *1. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
2. 針先、注射筒の先、製剤バイアルのゴム栓部分には直接触れないでください。
3. 異物があつたり溶解しなかったりする場合には使用しないでください。
4. 本品の詳しい処分方法は、医療機関にお尋ねください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は清潔な場所で使用すること。
- 2) 構成部品の包装を開封したら直ちに使用すること。
- 3) 本品を落としたり、衝撃を与えると破損するおそれがあるので、取扱いには十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

*有効期間: 製造後3年6ヶ月 [自己認証 (自社データ) による]

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売

ニプロ株式会社
フリーダイヤル: 0120-226-069
受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造

ニプロ医工株式会社

*販売 (お問い合わせ先)

サノフィ株式会社
コールセンター くすり相談室
〒163-1488 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
フリーダイヤル: 0120-109-905 FAX: 03-6301-3010



ニプロ株式会社