

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 採液針 70324000

ツートック® (ハイゼントラ専用)


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

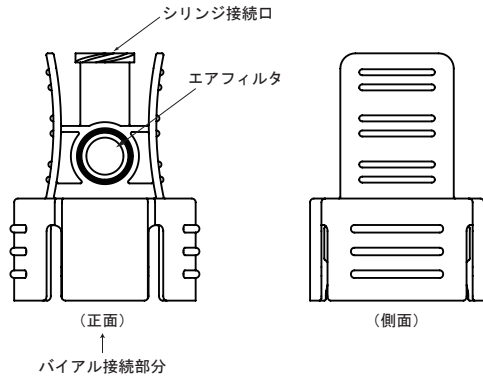

2. 材質

本体	アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン 共重合体
エアフィルタ	ポリビニルジフルオライド

【使用目的又は効果】

本品は、シリンジに取り付けて薬液容器等から薬液を採取するために用いる採液針である。

【使用方法等】

1. 本品を開封後、シリンジ接続口およびバイアル接続部分に触れないように包装から取り出します。
2. シリンジをシリンジ接続口にしっかりと接続します。
3. あらかじめキャップを外しておいたバイアルのゴム部分に、シリンジを接続した本品のバイアル接続部分を真っ直ぐ刺通し固定します。
4. 注射用水を注入し、バイアルを垂直に保ったままゆっくり回して溶解します。
5. バイアルを倒立にして、シリンジのプランジャーをゆっくりと引き、薬液を吸引します。
6. シリンジを本品から取り外した後、注射針の接続部位に触れないように注意し、適当な注射針を取り付けます。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意すること。
- 2) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まり等について十分注意し、異常が認められた場合は使用を中止し別の製品と交換すること。
- 3) 本品は合成樹脂製品なので、冷蔵保存取り出し直後の低温での使用時には取扱いに注意すること。[破損するおそれがある。]

2. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
(1) 誤穿刺
(2) 本品の破損
(3) 接続部の緩み
(4) 液漏れ
(5) 詰まり
- 2) その他の有害事象
(1) 刺し傷
(2) 出血

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

内箱の使用期限を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年 [自己認証（自社データ）による]

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：03-5684-5611

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社