

「UKカフ付カテーテル」の付属品
(リペアクランプ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、UKカフ付カテーテルの付属品であり、補充用開閉器（リペアクランプ）である。

1) 補充用開閉器（リペアクランプ）

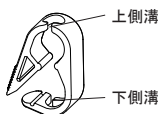

2. 材料

本品には生物由来の原材料は使用していない。

【使用目的又は効果】

本品は、人工腎臓（血液透析、血液濾過、血液濾過透析等）の実施を目的に血管内に留置し、送脱血、輸液、薬液等の投与を行うためのカテーテル製品であり、滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。本品のカテーテルは抗血栓性を有し、長期の血管内留置が可能であり、皮下組織に密着させるためのカフを有する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 枝管に付いている開閉器（クランプ）を、クランプホルダを残して取り外し、クランプホルダをカテーテルの分岐部側に移動します。
- 2) 枝管を補充用開閉器（リペアクランプ）の上側溝に押し当ててはめます。
- 3) クランプホルダを補充用開閉器（リペアクランプ）内側に入れてはめます。
- 4) 補充用開閉器（リペアクランプ）の下側溝に枝管を押し当ててはめます。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 開閉器（クランプ）を取り外す前に、カテーテルのハブにプラグが装着されていることを確認してください。
2. 開閉器（クランプ）を取り外す際、枝管を傷つけたり切断したりしないでください。
3. 開閉器（クランプ）を取り外す際、クランプホルダは取り外さないでください。[補充用開閉器（リペアクランプ）に組み合わせます。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 枝管が閉塞できなくなった場合は使用を中止し、新しい補充用開閉器（リペアクランプ）に交換すること。

2. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
(1) 開閉器（クランプ）の破損
(2) カテーテルの破損
- 2) 重大な有害事象
(1) 交差感染

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ株式会社

使用前に取扱説明書を必ずお読み下さい。



ニプロ株式会社