

機械器具 48 注射筒  
一般医療機器 注射筒キャップ 16825000

## オスNRキャップ


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 使用方法  
1) 再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

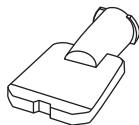

嵌合部はIS080369-6（神経麻酔用コネクタ規格）に適合する。

#### 【使用目的又は効果】

本品は、ニプロNRシリンジの先端等を保護するキャップである。

#### 【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 包装を開封し、本品を取り出します。
- 2) シリンジ等に確実に嵌合させ使用します。

2. 併用する医療機器

本品は、以下の医療機器と組み合わせて使用します。

- 1) 販売名：ニプロNRシリンジ  
届出番号：27B1X00045000141

#### <使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品の嵌合部は、IS080369-6（神経麻酔用コネクタ規格）対応のため、IS080369-6に適合する製品と接続してください。IS080369-6であるかどうかは包装表示で確認してください。
2. 接続部への麻酔薬等の付着に注意してください。〔接続部の緩み等のおそれがあります。〕

#### 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は、菌の繁殖防止、及び筒内薬液の効力低下防止に有効なものではない。
- 2) 本品を鉗子等でつまんで傷をつけないこと。〔液漏れ、空気混入や破損のおそれがある。〕
- 3) 接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。〔外れなくなる、又は破損し、接続部からの液漏れ、空気混入のおそれがある。〕
- 4) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

- \*2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。  
有効期間：滅菌後3年〔自己認証（自社データ）による〕

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*\*製造販売（お問い合わせ先）  
ニプロ株式会社  
フリーダイヤル：0120-226-410  
受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造  
ニプロ株式会社



ニプロ株式会社