

ニプロ活栓 (多連活栓PPタイプ)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品には2連の品種やコックが3パートタイプの品種もある。

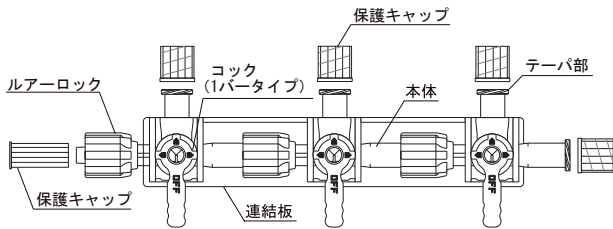

2. 材質

| | |
|-----|---------|
| 本体 | ポリプロピレン |
| コック | ポリエチレン |

【使用目的又は効果】

脈管系への液注入を調節する血管内投与キットの部品である。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 包装を開封します。
2. 本体を包装から取り出します。
3. 他の医療機器と確実に接続します。
4. 必要に応じコックを回転し、流路を変更します。
1パートタイプの場合は、↑の位置が開路でOFFの位置が閉路となります。3パートタイプの場合は、↑の位置が開路でそれ以外の位置は閉路となります。

<使用方法等に関する使用上の注意>

1. 接続部に薬液等を付着させないでください。[接続部の緩み等が発生するおそれがあります。]
2. コックを必要以上に回転させないでください。特に、1パートタイプを使用する場合は、コックを180°以上回転させないでください。[破損等の原因になります。]
3. 針用アダプタを装着し針を用いて混注する場合は、針先がコック及びテーバ部内面に接触し、傷を付けないよう注意してください。[流路変更によるOFF機能が働かない、又は他の医療機器と接続した場合に液漏れが発生するおそれがあります。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 血管造影等の高圧注入には使用しないこと。[破損するおそれがある。]
- 2) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、空気混入、液漏れ及び詰まり等について、定期的に確認すること。これらの事象が確認された場合は直ちに新しい製品と交換すること。
- 3) コネクタを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。
[コネクタが外れなくなる又は、コネクタが破損し、接続部からの液漏れ、空気混入が発生するおそれがある。]
- 4) 本品に接続する注射筒やコネクタ等が外れないようしっかり接続すること。また、薬液が流れる方向にコックが操作されていることを確認すること。

- 5) コックに対し、引き抜く方向に過度な負荷をかけないこと。
[コックが外れ、液漏れが発生するおそれがある。]
- 6) 本品から薬液を混注する場合は、空気の混入に注意すること。
- 7) 混注する場合は、混注する薬液を考慮し、必要に応じてフラッシュを行う等の適切な方法で行うこと。[混注後、薬液の一部が滞留し、直ちに流れないおそれがある。]
- 8) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。[破損するおそれがある。]

2. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
- (1) 液漏れ
- (2) 外れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間: 滅菌後3年 [自己認証 (自社データ) による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売 (お問い合わせ先)

ニプロ株式会社

フリーダイヤル: 0120-226-410

受付時間: 9:00~17:15 (土・日・祝日を除く)

製造

ニプロ株式会社



ニプロ株式会社