

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 保護栓 70280000

メスNRキャップ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

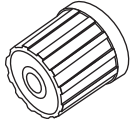

嵌合部はIS080369-6（神経麻酔用コネクタ規格）に適合する。

【使用目的又は効果】

内容物の漏れを防止し、使用するまで内容物の無菌状態を維持するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 包装を開封し、本品を取り出します。
- 2) メスコネクタに確実に嵌合させ使用します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品の嵌合部は、IS080369-6（神経麻酔用コネクタ規格）対応のため、IS080369-6に適合する製品と接続してください。IS080369-6であるかどうかは包装表示で確認してください。
2. 接続部への麻酔薬等の付着に注意してください。[接続部の緩み等のおそれがあります。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品を鉗子等でつまんで傷をつけないこと。[液漏れ、空気混入や破損のおそれがある。]
- 2) 接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。[外れなくなる、又は破損し、接続部からの液漏れ、空気混入のおそれがある。]
- 3) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

*2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ株式会社



ニプロ株式会社