

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 保護栓 70280000

メスルーキャップN

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、メスルーテーパを有するコネクタ等へ接続する滅菌済みのキャップである。

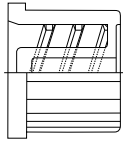

2. 材質

キャップ	ポリプロピレン
------	---------

【使用目的又は効果】

用具の内容物の漏れを防止し、使用するまで内容物の無菌状態を維持するために用いるプラスチック製の蓋状の器具である。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 包装の上蓋シールを開封し、透明ケースに入っている状態のまま本品をメスコネクタに接続します。
2. 本品が確実に接続されていることを確認した後、透明ケースを取り外します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 上蓋シールを上にした状態で開封してください。
2. 本品をコネクタ等に真っ直ぐにしっかりとねじ込み、十分接続したことを確認の上、透明ケースをそのまま真っ直ぐ本品から取り外してください。
3. 本品の過度な締めすぎに注意してください。[本品が外れなくなったり、破損のおそれがあります。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 接続部への薬液等の付着に注意すること。[接続部の緩み等のおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年 [自己認証 (自社データ) による]

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売 (お問い合わせ先)

ニプロ株式会社

フリーダイヤル: 0120-226-410

受付時間: 9:00~17:15 (土・日・祝日を除く)

製造

サンシード株式会社



ニプロ株式会社