

見針絆 みはりばん

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法


- 1) 再使用禁止
- 2) 本品は「見針絆用検知器」専用であるため、それ以外の機器には接続しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は粘着テープとセンサが印刷されたパッドから構成されている。

本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みである。

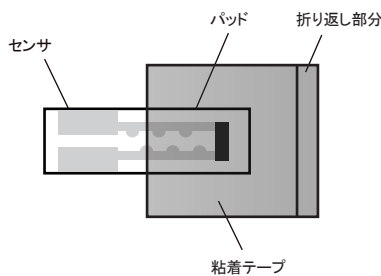

2. 材質

粘着テープ	レーヨン、合成繊維、アクリル系粘着剤
パッド	不織布
センサ	銀及びカーボンペースト


【使用目的又は効果】

血液透析又は他の目的で、ブラッドアクセス器具を安定化(固定)させるために用いる器具である。

【使用方法等】

1. 貼り方

- 1) 個包装を開封し、本品の粘着テープの折り返し部分を持ち、台紙からはがします（図1参照）。
- 2) 穿刺部位に本品のパッドをあて、しっかり密着させます（図2参照）。
- 3) センサのはさみ部分を検知器の専用クリップ（別売）で挟みます（図3参照）。
- 4) 専用クリップを穿刺針へ取付けます（図4参照）。

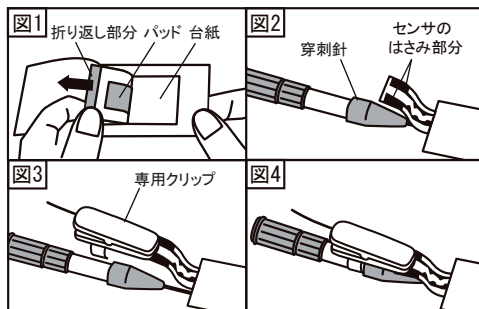

2. はがし方

- 1) はがす前に、粘着テープの折り返し部分を確認します。
- 2) はがす際は、折り返し部分を持ってゆっくりはがします。
- 3) 専用クリップは、本品をはがす前に取り外すか、本品をはがす際に一緒に穿刺針から取り外した後で本品から取り外します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 台紙から本品をはがす際は、センサに触れないでください。また、センサを濡らしたり、汚染させないでください。
2. 本品の粘着テープを直接穿刺部位に貼らないでください。
3. 本品を皮膚にしっかりと固定してください。必要に応じて、テープでの補強を行ってください。[検知器が正しく作動しないおそれがあります。]
4. 検知器の専用クリップは、正確にセンサのはさみ部分を挟んでください。[検知器が正しく作動しないおそれがあります。]
5. 本品をはがす際は、皮膚を押さえながらゆっくりはがしてください。はがれにくい場合や粘着剤の残渣がみられた場合は医療用剥離剤を使用してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 穿刺部位とそのまわりを清潔にし、汗等の水気をよく取って使用すること。特に消毒剤・液剤等はよく乾燥させてから使用すること。[水気があると、貼りにくいおそれがある。]
- 2) 皮膚がかぶれやすい方へは、注意して使用すること。
- 3) 本品の使用により、皮膚障害、発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。

2. 不具合・有害事象

- 1) その他の有害事象
 - (1) 皮膚のかぶれ
 - (2) 皮膚障害
 - (3) 発疹、発赤、かゆみ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 小児の手の届かない場所に保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

*有効期間：滅菌後15ヶ月

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

タツタ電線株式会社



ニプロ株式会社