

## 鼻腔拡張チューブ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

1. 使用方法  
1) 再使用禁止


### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

本品は、鼻腔内に挿入するチューブと挿入する際の保持部であるグリップよりなる。

チューブは先端が細くなるようテーパ加工がなされている。また、チューブには挿入深度の目安として深度マークが入っている場合がある。

<構造図（代表図）>

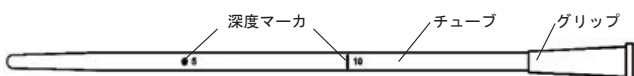

#### 2. 材質

チューブ	ポリ塩化ビニル
------	---------

ポリ塩化ビニルの可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルである。

### 【使用目的又は効果】

本品は鼻腔拡張を目的とし、経鼻内視鏡検査の前処置に使用する。

### 【使用方法等】

1. チューブに粘滑・表面麻酔剤をガーゼ等で薄く塗布します。  
必要に応じてその上から噴霧式麻酔剤を撒布します。
2. 麻酔済みの鼻腔にチューブを挿入します。
3. チューブを鼻腔から抜いて、鼻腔内に余分に付着した麻酔剤を綿棒等で軽く拭き取ります。

### <使用方法等に関連する使用上の注意>

1. チューブに麻酔剤を塗布する際、強くこすらないように注意してください。
2. 鼻腔粘膜損傷及びそれに伴う出血のおそれがあるので無理に押し込むことは避けてください。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 1) グリップ部分から決して液体を注がないこと。
- 2) チューブ印刷部をこすったり、あるいは薬液がついた状態で放置しないこと。[目盛等の印刷部が消えるおそれがある。]

#### 2. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合  
(1) 本品の破損
- 2) その他の有害事象  
(1) 鼻腔粘膜損傷  
(2) 出血

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
2. 有効期間  
包装の使用期限欄を参照のこと。  
有効期間：滅菌後3年 [自己認証（自社データ）による]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*製造販売（お問い合わせ先）  
ニプロ株式会社  
フリーダイヤル：0120-226-410  
受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造  
ニプロ株式会社



ニプロ株式会社