

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 調整用薬液注入コネクタ 70396000
ニプロインジェクションプラグ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、血液バッグ又は分離バッグ等の膜付チューブに穿刺し、血液又は薬液等を注入・排出するためのプラスチック針、ゴムボタン等からなる。

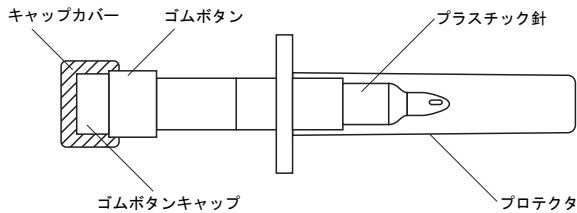

2. 材質

プラスチック針	アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体
ゴムボタン	イソブレンゴム

***【使用目的又は効果】**

血液バッグや薬液容器などに装着して、バッグ内や薬液容器などに薬液などを注入・排出するために用いる器具である。

【使用方法等】

1. 切り口部より開封し、本品を取り出します。
2. プラスチック針のプロテクタを取り外します。
3. バッグの排出ポートを開封します。
4. バッグの膜付チューブにプラスチック針を穿刺します。
5. キャップカバーを外し、針付シリンジをゴムボタンに穿刺します。
6. シリンジのプランジャを引いて、バッグ内の血液等を取り出します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 嵌合部には直接手を触れないよう注意してください。
2. 穿刺には十分注意してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、薬液漏れ、空気の混入及び詰まり等について、確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年 [自己認証 (自社データ) による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売 (お問い合わせ先)

ニプロ株式会社
フリーダイヤル : 0120-226-410
受付時間 : 9:00~17:15 (土・日・祝日を除く)

製造

ニプロ株式会社



ニプロ株式会社