

機械器具 74 医薬品注入器  
一般医療機器 採液針 70324000

## ニプロNR採液針

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 使用方法  
1) 再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状・構造

本品は針管、針基及びプロテクタからなる。



針基はIS080369-6（神経麻酔用コネクタ規格）に適合する。

##### 2. 材質

針管	ステンレス鋼
針基	ポリプロピレン

#### 【使用目的又は効果】

注射筒に取り付けて薬液容器等から薬液を採取するために用いる採液針である。

#### 【使用方法等】

1. 個包装が密封されていることを確認します。
2. 個包装を開封し、本品を個包装内から取り出します。
3. 注射筒等に確実に接続します。
4. プロテクタを真っ直ぐ引いて外した後、バイアル等の薬液容器に穿刺し、薬液を採取します。

#### <使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品の針基は、IS080369-6（神経麻酔用コネクタ規格）対応のため、IS080369-6に適合する製品と接続してください。IS080369-6であるかどうかは包装表示で確認してください。
2. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
3. 針基に過剰な負荷をかけないでください。また、接続時はプロテクタで針基に過剰な回転負荷をかけないでください。[破損するおそれがあります。]
4. 接続部に薬液等を付着させないでください。[接続部の緩み等が発生するおそれがあります。]
5. バイアル等のゴム栓に穿刺する場合は、なるべく刺通面に垂直に刺し、横方向に力をかけたり、同一部位に穿刺されることがないように注意してください。
6. リキャップしないでください。[リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがあります。]

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- 1) 個包装を輪ゴムでしばる等の負荷をかけた状態で長期間保管をしないこと。[包装に負荷がかかり、破損するおそれがある。]
- 2) 個包装での保管は、個包装が経時的に外的環境の影響を受けやすく破損することがあるため、十分注意すること。
- 3) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まり等について、十分注意すること。

- 4) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。[破損するおそれがある。]
- 5) 薬液の吸引後は直ちに使用すること。[薬液が結晶化し、内部に詰まるおそれがある。]

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

##### 2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

\*有効期間：滅菌後5年 [自己認証（自社データ）による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*\*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO (SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]



ニプロ株式会社