

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄針 70459000

ブランド針

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、針管及び針基、プロテクタからなる。



2. 材質

針管	ステンレス鋼
針基	ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる器具である。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品を注射筒にしっかり取り付けます。
3. プロテクタを真っ直ぐ引いて外し、使用します。

*＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 針基に過剰な負荷をかけないでください。また、接続時はプロテクタで針基に過剰な回転負荷をかけないでください。[針管、又は針基の破損のおそれがあります。]
2. 接続部に薬液、又は血液を付着させないでください。[接続部の緩み等のおそれがあります。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まり等について、十分注意すること。
- 2) 個包装を輪ゴムでしばる等の負荷をかけた状態で長時間保管しないこと。[破損のおそれがある。]
- 3) 個包装での保管は、個包装が経時的に外的環境の影響を受けやすいため十分注意すること。[破損のおそれがある。]
- 4) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。[破損のおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後5年 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO (SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]



ニプロ株式会社