

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄針 70459000

ブランド針 (シリンジ付)

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 使用方法

1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、針管及び針基、プロテクタからなる洗浄針に注射筒が付いたものである。

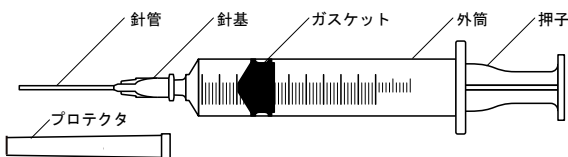

2. 材質

針管	ステンレス鋼
外筒、針基	ポリプロピレン
ガスケット	スチレン系熱可塑性エラストマー

【使用目的又は効果】

刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる器具である。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. プロテクタを真っ直ぐ引いて外し、使用します。

*＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 洗浄針が外れていたり、緩んでいる場合には、プロテクタを付けたまま、しっかりと固定し直してください。
2. 針基に過剰な負荷をかけないでください。また、固定し直す際はプロテクタで針基に過剰な回転負荷をかけないでください。【針管、又は針基の破損のおそれがあります。】
3. 接続部に薬液、又は血液を付着させないでください。【接続部の緩み等のおそれがあります。】
4. 押子は真っ直ぐに引いてください。【斜めに引くと、ガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れ、空気混入、又はガスケットが外れるおそれがあります。】
5. 外筒印刷部の目盛を超えて押子を引かないでください。【押子が外筒から抜けて液漏れや空気混入のおそれがあります。】

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まり等について、十分注意すること。
- 2) 外筒を強く握る等、圧迫するような負荷をかけないこと。【圧迫によりガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れや空気混入のおそれがある。】
- 3) 外筒印刷部をこすったり、あるいは薬液がついた状態で放置しないこと。【目盛等の印刷部が剥がれるおそれがある。】
- 4) 個包装を輪ゴムでしばる等の負荷をかけた状態で長時間保管しないこと。【破損のおそれがある。】

- 5) 個包装での保管は、個包装が経時的に外的環境の影響を受けやすいため十分注意すること。【破損のおそれがある。】
- 6) 運搬・操作時には、振動や衝撃に注意すること。
- 7) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。【破損のおそれがある。】

*2. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- | | |
|------------------|-----------------|
| (1) 針管の変形、破損、詰まり | (2) 針基や注射筒の破損 |
| (3) 接続部の緩み | (4) 液漏れ |
| (5) 摺動抵抗の増加 | (6) 目盛等の印刷部の剥がれ |
| (7) プロテクタの外れ | |

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ株式会社



ニプロ株式会社