

機械器具 48 注射筒  
一般医療機器 注射筒キャップ 16825000  
**ニプロENシリンジキャップ**


再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

1. 使用方法  
1) 再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

1. 形状・構造

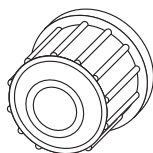

嵌合部はIS080369-3（経腸栄養用コネクタ規格）に適合する。

**【使用目的又は効果】**

本品は、ニプロENシリンジの先端を保護するキャップである。

**【使用方法等】**

1. 使用方法

- 1) 包装を開封し、本品を取り出します。
- 2) シリンジに確実に嵌合させ使用します。

2. 併用する医療機器

本品は、以下の医療機器と組み合わせて使用します。

- 1) 販売名：ニプロENシリンジ  
届出番号：27B1X00045000146

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品の嵌合部は、IS080369-3（経腸栄養用コネクタ規格）対応のため、IS080369-3に適合する製品と接続してください。IS080369-3であるかどうかは包装表示で確認してください。
2. 接続部への経腸栄養剤や医薬品等の付着に注意してください。[接続部の緩み等のおそれがあります。]

**【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は、菌の繁殖防止、及び筒内薬液の効力低下防止に有効なものではない。
- 2) 本品を鉗子等でつまんで傷をつけないこと。[液漏れ、空気混入や破損のおそれがある。]
- 3) 接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。[外れなくなる、又は破損し、接続部からの液漏れ、空気混入のおそれがある。]
- 4) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。  
有効期間：滅菌後3年 [自己認証（自社データ）による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

\*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ株式会社



ニプロ株式会社