

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 採液針 70324000

ツートック®

（エアフィルタ付／キュービトル®専用）


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

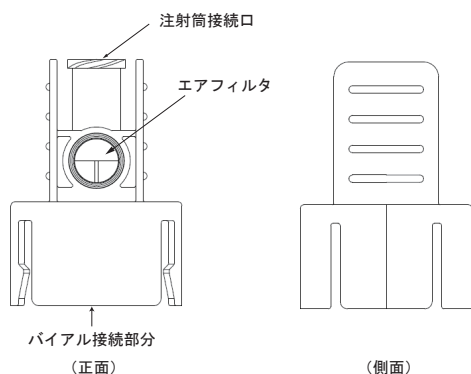

2. 材質

本体	アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン 共重合体
エアフィルタ	ポリビニルジフルオライド

【使用目的又は効果】

本品は、シリンジに取り付けて薬液容器等から薬液を採取するために用いる採液針である。

【使用方法等】

1. 本品を開封後、注射筒接続口及びバイアル接続部分に触れないように包装から取り出します。
2. あらかじめキャップを外しておいた薬剤バイアルのゴム部分に、本品のバイアル接続部分を真っ直ぐ刺通し固定します。
3. 注射筒を注射筒接続口にしっかりと接続します。必要に応じて溶解液の入った注射筒を注射筒接続口に接続し、注射筒内の溶解液を注入して薬剤を溶解します。
4. 薬剤バイアルを上下逆さまにして、注射筒の押子をゆっくりと引き、薬液全量を吸引します。
5. 注射筒を本品から取り外した後、注射針の接続部位に触れないように注意し、適当な注射針を取り付けます。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意すること。
- 2) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まり等について十分注意し、異常が認められた場合は使用を中止し別の製品と交換すること。
- 3) 本品は合成樹脂製品なので、冷蔵保存取り出し直後の低温での使用時には取扱いに注意すること。[破損するおそれがある。]

2. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
- (1) 誤穿刺
 - (2) 本品の破損
 - (3) 接続部の緩み
 - (4) 液漏れ
 - (5) 詰まり

2) その他の有害事象

- (1) 刺し傷
- (2) 出血

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

内箱の使用期限を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-069

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ医工株式会社



NIPRO

ニプロ株式会社