

機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器 眼科用針 70200000

テノン囊下投与針

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品の針管はわん（湾）曲形状をしている。
針管はチューブにより保護されている場合がある。

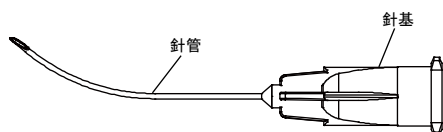

2. 材質

針管	ステンレス鋼
針基	ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

テノン囊への薬液の注入に用いること。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品を注射筒又は医薬品容器等に取り付けます。
3. チューブが付いているものについては、チューブを針管の曲型に沿うように引いて外します。
4. 注入部位へ針管を挿入します。
5. 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
2. 包装の開封時やチューブを引き抜く際などに、針管に過剰な負荷をかけないように注意してください。〔針先が変形し、薬液を注入しづらくなるおそれがあります。〕
3. 挿入時、通常と異なる抵抗がある場合は無理に挿入しないでください。〔眼内組織損傷のおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は合成樹脂を用いた製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕

2. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- (1) 液漏れ

2) その他の有害事象

- (1) 誤穿刺
- (2) 眼内組織の損傷

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-069

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ医工株式会社

販売

わかもと製薬株式会社



ニプロ株式会社