

ノブリード

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

粘着テープ : ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤
パッド : カチオン化セルロース、不織布

滅菌済医療機器

規格	サイズ	入数
Mサイズ	φ36mm	80枚入

【使用目的又は効果】


注射針の穿刺部の被覆保護

【使用方法等】

注射針の穿刺部の大きさ及び処置方法に合わせて適切なサイズを選択してください。


(貼り方)

- ① 包装紙を矢印方向にはがします。
- ② 折り返しのある剥離紙とテープを持ち、台紙からはがします。
- ③ 穿刺部にパッドをあて、貼付してください。その後、折り返しのある剥離紙をはがします。
- ④ テープ周囲を軽く押さえ、しっかり密着させてください。

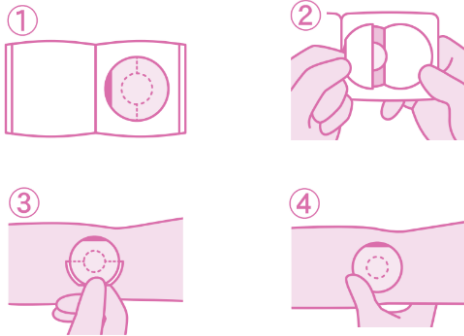

(はがし方)

- ① はがす前に、つまみ位置をご確認ください。
- ② はがす際は、つまみを持って、ゆっくりはがしてください。

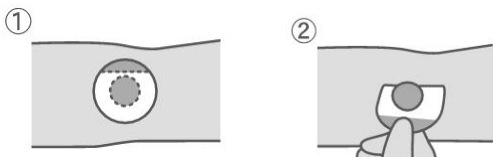

※【使用上の注意】

- ① 穿刺部とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があると、つきにくい場合があります。特に消毒剤・液剤等はよく乾燥させてから使用してください。
- ② 本品の使用により、感染症及び皮膚障害と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- ③ 粘着面を患部に貼らないでください。
- ④ 本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
- ⑤ 救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意してご使用ください。
- ⑥ 滅菌効果が損なわれますので、個包装は使用時に開封してください。
- ⑦ 包装が破損及び汚損している場合には、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。
- ⑧ はがす際は、皮膚障害を防ぐため、皮膚を押さえながらゆっくりはがしてください。はがれにくい場合及び粘着剤の残渣がみられた場合は医療用剥離剤をご使用ください。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 直射日光を避け、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 使用の期限：製造日より、3年間（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 リバテープ製薬株式会社
熊本県熊本市北区植木町岩野 45
お客様相談室 TEL 0120-199-189

販売 ニプロ株式会社