

ニプロスポンジスワブ®

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の住所又は名称等】

製造販売(お問い合わせ先)
ニプロ株式会社
電話番号：03-5684-5611

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、プラスチック製のハンドルの先端にスポンジが付いた
検体採取用のスワブである。

製造

ニプロ株式会社



2. 材質

スポンジ	ポリウレタン
ハンドル	ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は検査のための試料を採取することを目的とした器具で
ある。

【使用方法等】

1. 使用方法

スポンジ部分を汚染しないように包装袋から取り出し、スポン
ジ部分で検体を採取します。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 包装から本品を取り出す時は、スポンジ部分およびハンドル
部分を指で押さえないこと。[スポンジ部分が指と接触し、ス
ポンジ部分が離脱・脱落するおそれがある。]
- 2) 個包装の開封後は速やかに検体採取を行い、検体を採取後は
速やかに検査に供すること。
- 3) 本品に部分的な白化があった場合は、使用しないこと。
- 4) 検体を採取するとき、採取する部位は粘膜なので傷つけない
よう、無理な力をかけないこと。

*5) 本品を意図的に変形させて使用しないこと。

*6) 全ての検体は汚染されているものとして注意して取り扱い、
使用後は感染防止に留意して安全な方法で廃棄すること。

*7) 本品を鼻腔へ挿入する際、無理に入れないこと。

2. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- (1) スポンジ部分の離脱・脱落

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後4年 [自己認証(自社データ)による]



ニプロ株式会社