



「セーフテック® Pro インフュージョンシステム」 ソフト仕様変更のご案内

謹啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「セーフテック Pro インフュージョンシステム」の以下対象製品について、ソフトウェアの仕様変更を行いましたのでご案内申し上げます。

謹白

対象製品

販売名	型式	商品コード	JANコード
セーフテック Pro 輸液ポンプユニット	SIU-F1	56-641	4987458566417
セーフテック Pro シリンジポンプユニット	SIU-S1	56-642	4987458566424

セーフテック Pro 輸液ポンプユニット

クラス分類：クラスⅢ（高度管理医療機器）、特定保守管理医療機器

一般的名称：汎用輸液ポンプ

医療機器承認番号：30600BZX00033000

セーフテック Pro シリンジポンプユニット

クラス分類：クラスⅢ（高度管理医療機器）、特定保守管理医療機器

一般的名称：注射筒輸液ポンプ

医療機器承認番号：30600BZX00104000

仕様変更内容

以下の通り、仕様変更を行いました。

機能名	変更前	変更後
スタンバイ機能	スタンバイ時間：20分	スタンバイ時間：以下から選んで設定可能 <5,10,15,20,30,60,90分,選択>
	メニュー内位置：上から7番目	メニュー内位置：上から1番目
	停止・消音スイッチでスタンバイ解除不可	停止・消音スイッチでスタンバイ解除可能
早送り・ボラス機能	待機画面で早送り(ボラス)を再開する際、 早送り(ボラス)量をリセット	待機画面で早送り(ボラス)を再開する際、 早送り(ボラス)量を保持
再警報機能※ (シリンジポンプユニットのみ)	送液中に発生する警報の消音後から再警報までの時間：2分	送液中に発生する警報の消音後から再警報までの時間：90分

※該当の警報：閉塞予測警報、終了予告警報

仕様変更理由

- ・操作忘れ警報や再警報の頻発を抑えるため、スタンバイ時間を選択式にし、一部警報の再警報時間を延長しました。
- ・早送りやボラスの総量を分かりやすくするため、待機画面で早送り(ボラス)量を保持するよう変更しました。

変更開始時期

2025年4月出荷分より対応

以上