

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 調整用薬液注入コネクタ 70396000

ニプロ シリンジコネクタ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 - 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

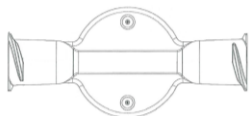

2. 材質

本体	ポリカーボネート
----	----------

【使用目的又は効果】

「プレフィル用シリンジ」等の薬液容器に装着し、反対側に装着した薬液容器へ薬液等を注入・排出する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 包装を開封し、本品を取り出します。
- 2) 「プレフィル用シリンジ」等の薬液容器に、本品をしっかりと接続します。
- 3) 反対側にも同様に、薬液容器をしっかりと接続します。

＜使用方法等に関する使用上の注意＞

1. 破損、接続部の緩み及び薬液漏れ等がないことを確認してください。
2. 接続部に薬液等を付着させないでください。〔接続部の緩み等が生じる可能性があります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 接続部から液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないこと。
- 2) 本品を接続する際には、過度な締め付けをしないこと。〔本品や薬液容器が破損し、液漏れのおそれがある。〕
- 3) 薬液の移注操作を1回行う毎に、本品を新しいものに交換すること。〔薬液によっては結晶化し、本品の内腔が詰まるおそれがある。〕
- 4) 本品は合成樹脂製品のため、低温時の取扱いには注意すること。〔製品が破損するおそれがある。〕
- 5) 本品は、ポリカーボネート製の部品であるため、以下の事項に注意すること。
 - (1) 使用中は本品の破損、接合部の緩み、空気混入、液漏れ及び詰まり等について、定期的に確認すること。

(2) 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤等を含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、ひび割れに注意すること。〔薬液によりひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。〕

(3) ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。

2. 不具合・有害事象

- 1) 破損
- 2) 漏れ
- 3) 緩み

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後5年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：03-5684-5611

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社